

باشد و در صورت عدم تغییر رنگ تا زرد کم رنگ، نتیجه منفی می باشد.

محدودیت آزمایش

شرایط انجام این آزمایش باید در محیط استریل انجام شده که مانع از آلودگی ثانویه گردد.

کنترل کیفی

<i>Klebsiella pneumoniae</i>	کنترل مثبت
<i>Escherichia coli</i>	کنترل منفی

مطابق با روش انجام آزمایش از سوش های ذکر شده استفاده کنید که نتیجه مثبت تست رنگ صورتی تا قرمز و نتیجه منفی، رنگ زرد تا بی رنگ می باشد.

نگهداری دیسک

دیسک ها باید در دمای بین 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود، حرارت بالاتر باعث کاهش قدرت دیسک ها شده و جواب مناسبی نخواهد داد.

هشدار های توصیه ای

کاربران محترم لطفا رعایت نکات ایمنی و بهداشتی را در اجرای آزمایش مورد توجه قرار دهید. تمامی مواد داخل آزمایشگاه را پاتوژن تلقی کنید.

لازم به ذکر است درخصوص این محصول که هیچگونه آسیب و حساسیتی بر اثر تماس با پوست برای اپراتور ایجاد نخواهد کرد. در هنگام برداشت دیسک به استریل بودن پنس توجه داشته باشید.

	For in vitro diagnostic use		See instructions for use
	Manufacturer		Temperature limits: ... °C to ... °C
	Lot number		Expiry date
	Harmful		Corrosive

References

1-Garrity.G.M.; Boone.D.R. Castenholz. R.W.; Eds. Berge's Manual of Systematic Bacteriology. Vol.1. Williams and Wilkins: Baltimore 1984

دیسک اوره آز

اصول آزمایش

یکی از روش های تشخیص انواع میکروارگانیسم ها از یکدیگر قدرت تخمیر اوره می باشد. در حضور دیسک آغشته به اوره در محیط مایع و در حضور میکروارگانیسم ایزوله شده و انجام عمل تخمیر و یا عدم تخمیر، با تغییر pH محیط و ایجاد تغییر رنگ متناسب، کمک به تشخیص نوع میکروب امکان پذیر می باشد.

محتویات کیت

دیسک آغشته به اوره 4 X 20 Disk

موارد مورد نیاز

لوله آزمایش استریل نرمال سالین استریل
سوش میکروبی ایزوله شده

تهیه کدورت استاندارد (0.5 مک فارلند)

0.5 میلی لیتر از محلول 1.175 درصد کلرور باریم را در یک بالن ژوژه 100 میلی لیتری ریخته و با اسید سولفوریک 1٪ حجم آن را به 100 میلی لیتر برسانید. این محلول در حرارت اتاق و در تاریکی به مدت 6 ماه پایدار است. این محلول را در یک لوله در بسته و هم قطر لوله تهیه سوپانسیون میکروبی، نگهداری کنید.

روش انجام آزمایش

ابتدا در یک لوله همولیز استریل، 0.5 سی سی از محلول نرمال سالین استریل اضافه کرده و به کمک لوپ از 1 الی 2 کلنی میکروبی برداشت کرده و سوپانسیون میکروبی مطابق با نیم مک فارلند را تهیه و سپس یک عدد دیسک اوره از را در آن قرار می دهیم. سطح سوپانسیون را با پارافین استریل بپوشانید تا محیط بی هوازی گردد. لوله ها را در دمای 25-37 درجه سلسیوس قرارداده و پس از 12 تا 24 ساعت نتیجه را قرائت نمایید.

بررسی نتیجه

در صورتیکه رنگ محلول سوپانسیون از بی رنگ به صورتی تا قرمز تغییر کرد عمل تخمیر انجام شده و نتیجه مثبت می

2- Holt. J.G. et al. Eds. Berge's Manual of Systematic Bacteriology. 9th ed. Williams and Wilkins: Baltimore 1994
3- Ellen. J. Baron & Sydney M. Finegold Bailey & Scotts Diagnostic Microbiology 8th ed. 1990 chap. 27, p. 371

تماس با ما

آدرس: تهران شهر قدس بلوار شهید اصغری میدان مادر خیابان

کیمیا پژوهان کوچه پارس پلاک 8 کد پستی

3753143539

تلفن : 02146884628 فاکس : 02146884627

ایمیل : info@padtanteb.ir

سایت : www.padtanteb.ir

